

A Dansac TRE gyűrű felhelyezése



Hogyan kell alkalmazni a TRE gyűrűt



További információért látogasson el a www.dansac.hu weboldalra.

FIGYELMEZTETÉSEK: Az egyszerhasználatos termék újrafelhasználása potenciális kockázatot jelenthet a felhasználó számára, például rossz tapadást. Az újrafeldolgozás, tisztítás, fertőtlenítés és sterilizálás veszélyeztetheti a terméket. Ez szagot vagy szivárgást eredményezhet. Biztosítja a megfelelő illeszkedést az utasításoknak megfelelően. Ha a tapadófelület nem megfelelően illeszkedik, vagy szivárgás következik be, bőrkárosodás léphet fel (pl. irritáció, hámsérülés, kiütés vagy bőrpír). Ez csökkentheti a viselési időt.

MEGJEGYZÉSEK: Kérjük, vegye figyelembe, hogy ebben az anyagban a termék alkalmazásának bemutatásához több személy szerepel. A megfelelő tapadás biztosítása érdekében tiszta, száraz, ép bőrre vigye fel. Ne használjon olajokat vagy krémeket. Ezek a termékek zavarhatják a tapadást. A termék illeszkedését számos tényező befolyásolja, például a sztóma alakja, a sztómából ürülő váladék konzisztenciája, sztóma kiemelkedése a bőr szintjétől, a bőr állapota, és a hasi kontúrok. A sztómás zsákrendszerrel vagy bőrirritációval kapcsolatos segítségért forduljon sztómaterápiás nővérhez vagy egészségügyi szakemberhez. A termék használatával kapcsolatos súlyos sérülés (incidens) esetén forduljon a helyi forgalmazóhoz vagy gyártóhoz, valamint a helyi illetékes hatóságokhoz. További információért keresse fel a www.dansac.hu weboldalt vagy a Dansac termékek magyarországi forgalmazóját, a HARTMANN-RICO Hungária Kft.-t.